


MicroDicom インストール手順

Windows 用 / JSFRI 死後画像読影ハンズオン事前準備

Windows

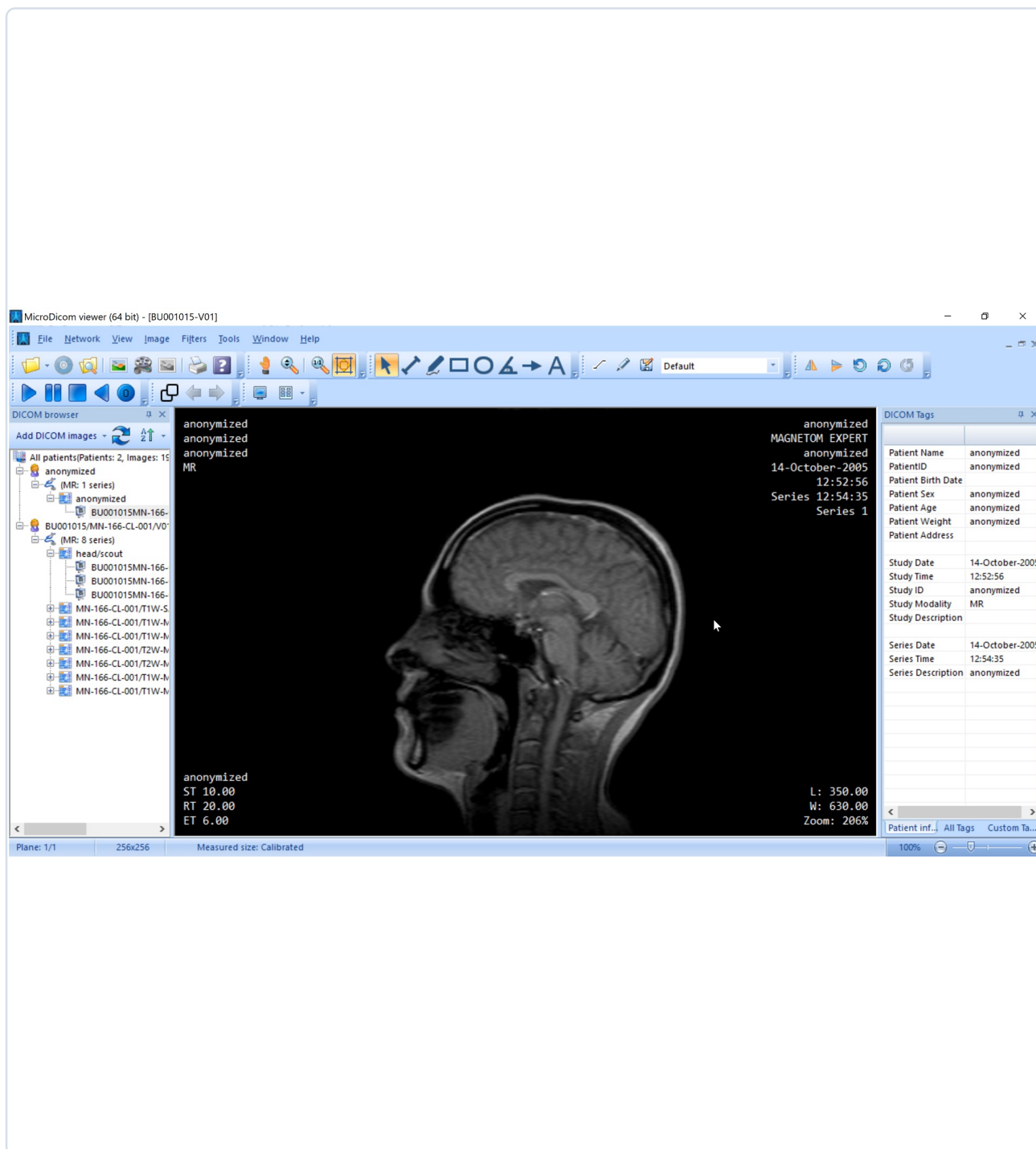

作成時点の公式サイトと公開マニュアルをもとに整理しています。ページデザインや版番号は今後変わることがあります。

1

公式サイトから最新版を保存する

Windows は通常 x64 を選択します。x86 は 32bit Windows 用です。



公式サイトの画面例。版番号は変わることがあります。


x64 のリンクをクリックして exe を保存します。迷ったら x64 を選んでください。

32bit Windows のみ x86 を選択

2

ダウンロードした exe を実行する

Windows の確認が出たら Yes を選択します。

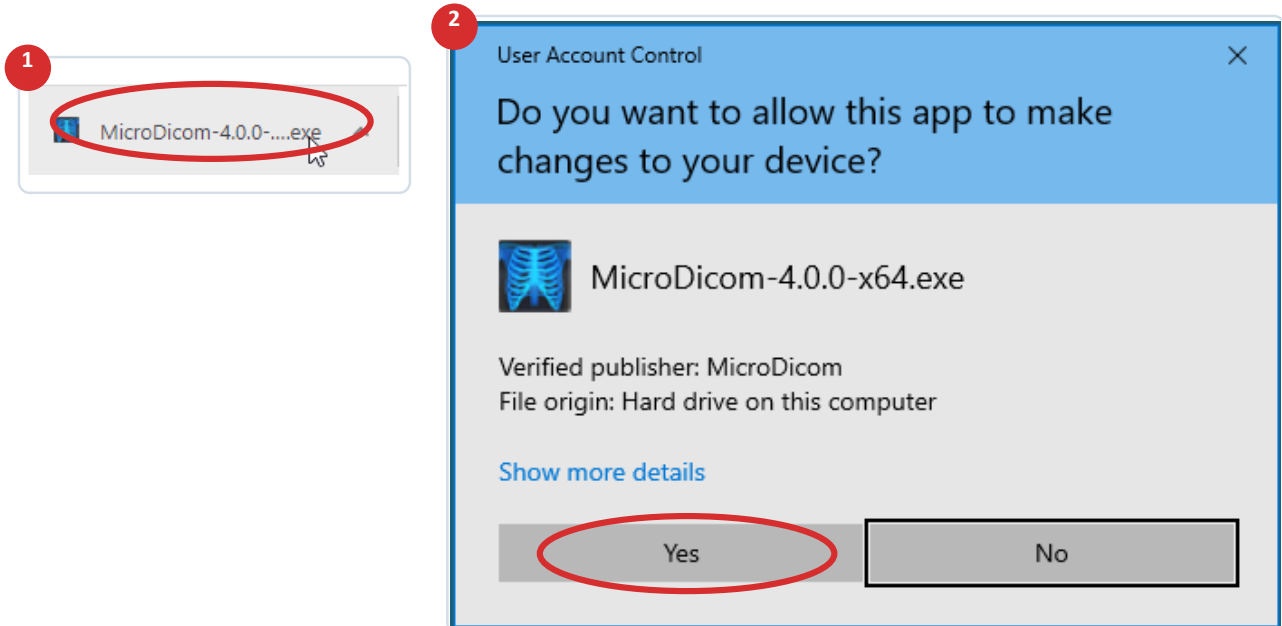


- ① ダウンロードした exe をダブルクリック。② 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と出たら Yes.


3

セットアップ前半を進める

Welcome 画面では Next. ライセンス画面では I Agree をクリックします。

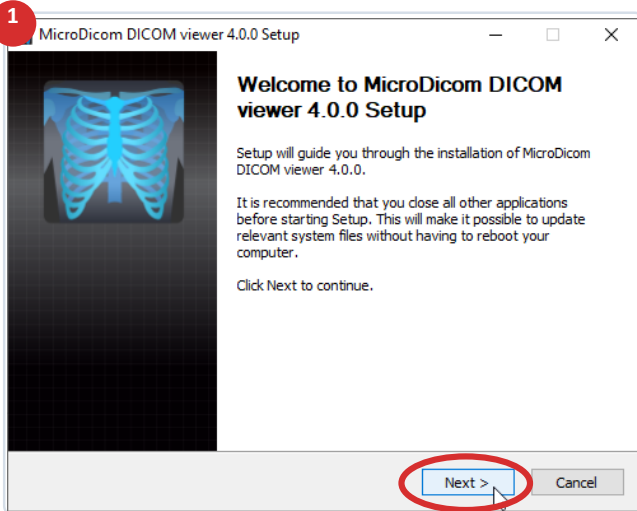

Welcome 画面で Next

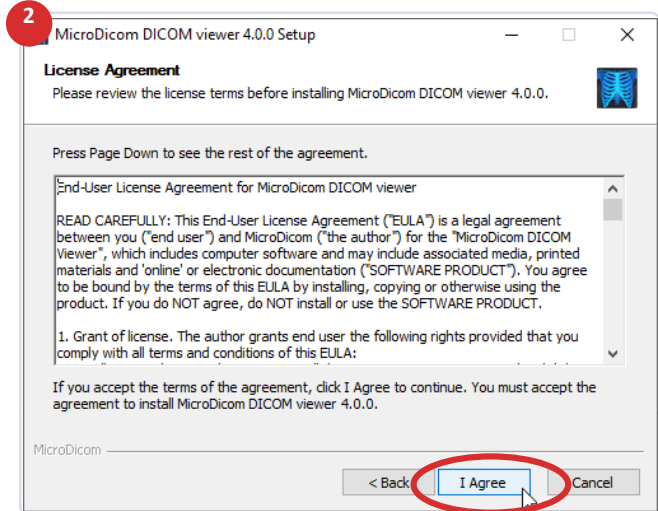


ライセンスに同意して I Agree

難しい設定はありません。画面どおりに Next → I Agree と進めれば大丈夫です。


4

セットアップ後半を進める

保存先は既定のままで構いません。Install と Finish まで進めます。

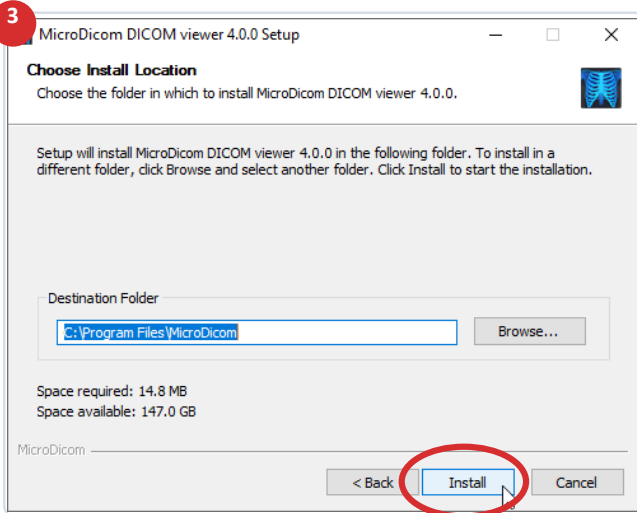

保存先は既定のままで Install

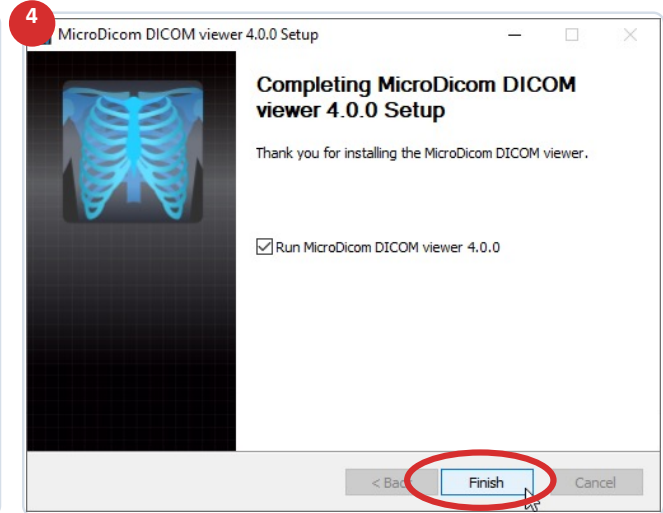


最後に Finish で完了

Run MicroDicom DICOM viewer にチェックが入っていれば、Finish 後に自動で起動します。

5

起動確認をする


起動できればインストール完了です。確認用 DICOM があれば画像表示まで試します。

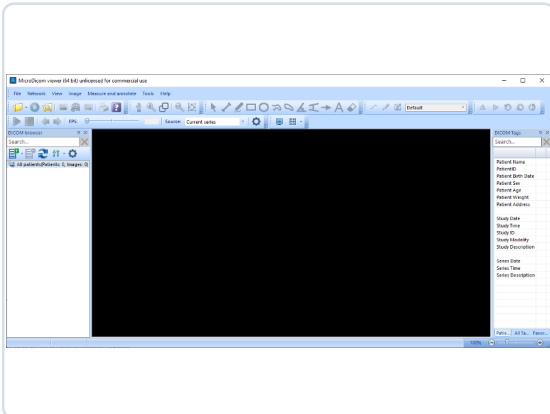

起動直後の画面

ここまで開けば、事前準備はほぼ完了です。

確認用 DICOM がある場合は、フォルダをドラッグ&ドロップして画像が表示されるか確認してください。

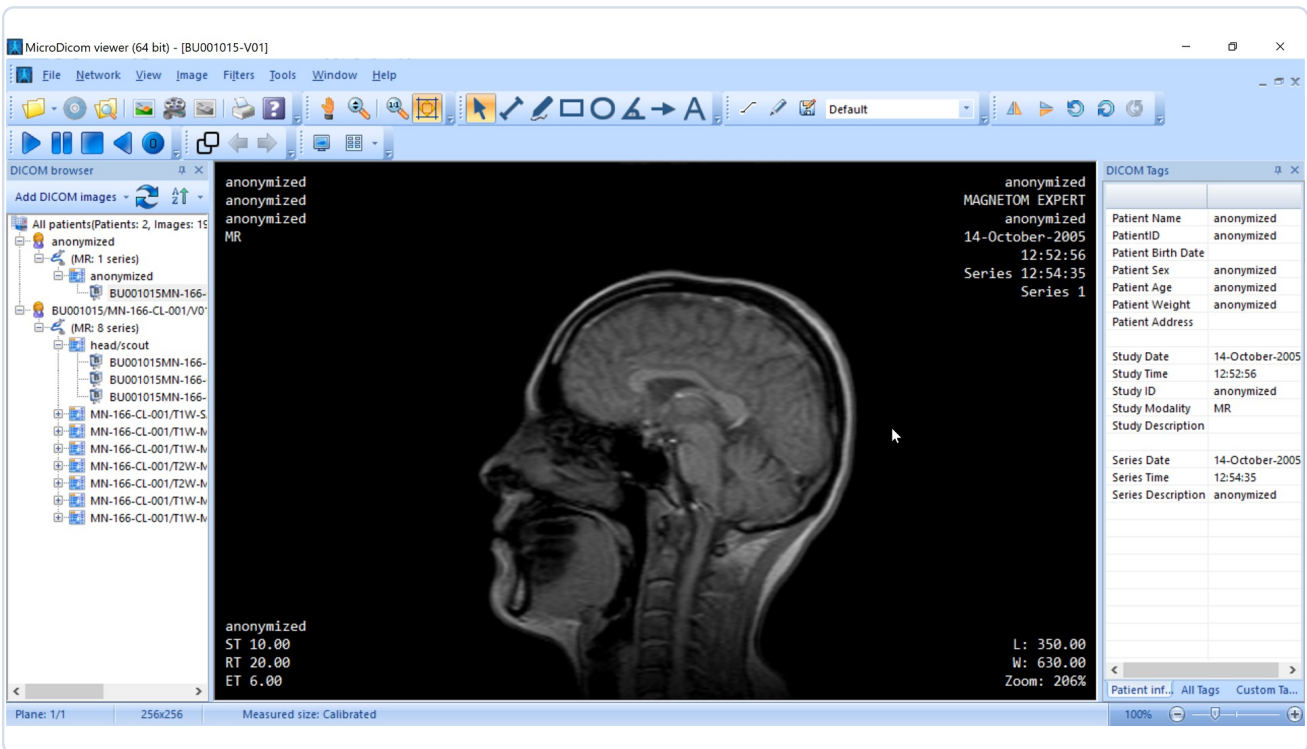

画像が表示されれば動作確認 OK。当日は配布 DICOM を読み込みます。